



Ready-to-use Tücher zur manuellen Aufbereitung in drei Schritten: Reinigung, Desinfektion und Nachreinigung.

gigasept® powerSET3

Unser Plus:

- 100 % ready-to-use – keine Vorbereitung oder Aktivierung notwendig
- umfassende Wirksamkeit (bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid gegen *C. difficile*) innerhalb von 5 Minuten
- flexible und platzsparende Verpackung
- mikrobiologische Begutachtung nach neuesten Standards
- großes Tuchformat (20 x 20 cm) und hochwertige Vliesstoffqualität für eine optimale Abreinigung und Benetzung
- antimikrobielle Beschichtung des Kartons als zusätzlicher Schutz vor Kreuzkontaminationen

Anwendungsgebiete

Das gigasept® powerSET3 dient zur manuellen Aufbereitung von folgenden Medizinprodukten ohne Lumen: transvaginale und transrektale Ultraschallsonden, transösophageale Echokardiographie-(TEE) Sonden, nicht-invasive Schallköpfe und flexible Endoskope ohne Kanalsystem (z.B. Nasopharyngoskope). Das Produkt besteht aus drei Komponenten, die in aufeinander folgenden Schritten zur Anwendung kommen und so einen vollständigen Aufbereitungsprozess darstellen:

- 1 gigasept® powerSET3 cleaning wipe** zur Reinigung des Medizinproduktes
- 2 gigasept® powerSET3 disinfection wipe** zur Abschlussdesinfektion des Medizinproduktes
- 3 gigasept® powerSET3 rinsing wipe** zur Entfernung möglicher Desinfektionsmittelrückstände auf dem Medizinprodukt

Zur Aufbereitung von Medizinprodukten sind maschinelle Verfahren zu bevorzugen. Sofern eine Wischaufbereitung zum Einsatz kommen soll und die Aufbereitungsempfehlung des jeweiligen Medizinprodukteherstellers dies zulässt, kann das gigasept® powerSET3 angewendet werden. Nicht zur Aufbereitung von Medizinprodukten mit Lumen und kritischen Medizinprodukten verwenden.

Produkteigenschaften

Effiziente Reinigung:

Leistungsstarke Tenside des gigasept® powerSET3 cleaning wipe entfernen innerhalb kürzester Zeit insbesondere organische Verschmutzungen. Die Tenside umlagern mit ihrem lipophilen Anteil wasserunlösliche Stoffe (z. B. fettthaltige Verschmutzungen) und bilden kleine Aggregate (Mizellen). So werden Anschmutzungen von Oberflächen abgelöst und ermöglichen eine effiziente Reinigung.

Leistungsstarke Desinfektion:

Das gigasept® powerSET3 disinfection wipe ist getränkt mit einer Lösung aus 0,06 % Peressigsäure. Peressigsäure wirkt bereits bei geringen Konzentrationen inaktivierend gegen ein breites Spektrum von Bakterien, einschließlich Mykobakterien und bakterieller Sporen, sowie gegen Pilze, behüllte und unbehüllte Viren. Sie verfügt außerdem über eine sehr gute Materialverträglichkeit und ist daher für den Einsatz mit Medizinprodukten aus unterschiedlichen Materialien geeignet. Aufgrund des geringeren Rohstoffverbrauchs und der niedrigen Energiebilanz gehört Peressigsäure zu den ressourcenschonenden antimikrobiellen Wirkstoffen. Sie weist ebenfalls eine sehr gute biologische Abbaubarkeit auf – der Wirkstoff Peressigsäure zerfällt nach der Anwendung in Essigsäure und Sauerstoff.

Anwendungshinweise

Alle Komponenten sind Teil des Aufbereitungsprozesses. Für eine ordnungsgemäße Aufbereitung von Medizinprodukten sind die folgenden drei Schritte erforderlich: Reinigung, Desinfektion und Nachreinigung.

Führen Sie die Aufbereitung ohne Unterbrechungen und nur durch nachweisbar geschultes Personal durch. Bei Unterbrechungen sind ggf. einzelne Aufbereitungsschritte zu wiederholen.

Beim erstmaligen Öffnen und Einfädeln des ersten Tuches der gigasept® powerSET3 cleaning wipes und gigasept® powerSET3 disinfection wipes auf hygienische Aspekte achten.

Eine Vorreinigung gemäß Standardarbeitsanweisung sollte unmittelbar nach der Anwendung erfolgen. Entfernen Sie, sofern verwendet, Schutzhülle und Ultraschallgel mit einem Einwegtuch



gigasept® powerSET3

vom Medizinprodukt. Wenden Sie danach das gigasept® powerSET3 an.

Medizinprodukte gründlich abwischen, bis diese vollständig benetzt und sichtbare Verschmutzungen oder mögliche Rückstände entfernt sind. Achten Sie dabei besonders auf Fugen, Kanten und Vertiefungen.

Die Dosen der gigasept® powerSET3 cleaning wipes und gigasept® powerSET3 disinfection wipes sollen nicht aus dem Set entnommen werden. Die Verpackung ist so optimiert, dass das Handling mit in der Verpackung verbleibenden Dosen optimal gegeben ist.

Bitte achten Sie darauf, dass eine Kreuzkontamination während und nach der Aufbereitung durch Kontakt des Medizinproduktes mit unreinen Gegenständen oder Flächen ausgeschlossen wird.

Nach Entnahme der gigasept® powerSET3 cleaning wipes und gigasept® powerSET3 disinfection wipes den Deckel wieder fest verschliessen.

Reinigen und desinfizieren Sie nach der Medizinproduktaufbereitung etwaige Transportbehälter, alle Handkontaktflächen (z.B. Tastatur, Ultraschallgel-Flasche, Haltegriff etc.) und Arbeitsflächen gründlich.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN 13727, EN 14561, EN 16615 gemäß VAH - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid EN 13624, EN 14562, EN 16615 gemäß VAH - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
mykobakterizid EN 14348, EN 14563, EN 16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
fungizid EN 13624, EN 14562, EN 16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
viruzid EN 14476, EN 16777, EN 17111, EN 16615 (mod.) - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
viruzid gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	5 Min.
Polyoma SV40 EN 16615 (mod.) - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
Polyoma SV40 gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	1 Min.
sporizid (C. difficile) EN 17126, EN 17846, gemäß VAH - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.

Listungen

- IHO-Liste
- VAH-Zertifikat
- ÖGHMP-Zertifikat



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



gigasept® powerSET3 cleaning wipe
gigasept® powerSET3 rinsing wipe



gigasept® powerSET3 disinfection wipe

Produktdaten

Zusammensetzung:

gigasept® powerSET3 cleaning wipe:

100 g Lösung enthalten: Tenside

gigasept® powerSET3 disinfection wipe:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 0,06 % Peressigsäure. Weitere Inhaltsstoffe: Wasserstoffperoxid, Essigsäure

gigasept® powerSET3 rinsing wipe:

100 g Lösung enthalten: Deionisiertes Wasser

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch Etikett, Gebrauchsanweisung und Produktinformation lesen.

Ausschließlich für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt.

Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen der Medizinproduktehersteller. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Schutzhandschuhe tragen. Nicht auf Aluminium verwenden.

Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
gigasept® powerSET3 (30 Aufbereitungen)	5 / Karton	70003677 PZN: 19077407

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 52100-0
Fax +49 40 52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com